

Clini5



“Clini5

Con más de treinta años de experiencia en el sector de atención inmediata, hemos escuchado...

”

Gran variedad de
pruebas de cribado primario

Resultados instantáneos
comparables a laboratorio

High Tech
interfaz intuitiva

Vídeo tutoriales

Comunicación
digital del resultado






“Clini5

Te escuchamos...”

01 El Dispositivo

AMPLIA GAMA DE ENSAYOS DE CRIBADO PRIMARIO

Diecinueve pruebas y ratios que cubren las necesidades de análisis en atención primaria: desde lípidos, hematología y función hepática hasta estrés oxidativo y ácido úrico. Las pruebas se realizan en sangre total.

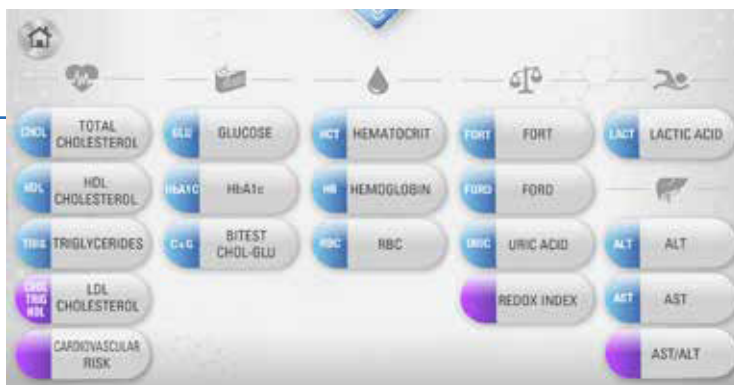

PANEL INTELIGENTE DE VISTAZO RÁPIDO DE ENSAYOS

Pantalla inteligente que muestra de un vistazo todos los ensayos disponibles, clasificados por categoría de enfermedad asociada.

TÚ ELIGES: MODO DE PRUEBA INDIVIDUAL

¿Necesitas realizar solo una prueba de colesterol, glucosa o hemoglobina? Listo. ¿Prefieres hacer hasta 5 ensayos a la vez? También es posible. Con Clini5 puedes ajustar el número de pruebas según lo que necesites.

INTERFAZ DE USUARIO DE ALTA TECNOLOGÍA Y FÁCIL MANEJO DE 7

Interfaz intuitiva y comunicación ágil. La tecnología táctil permite manejar el equipo incluso con guantes puestos.

INDICADORES CLAROS DE ERRORES

Facilita el uso del dispositivo y aporta tranquilidad extra durante el proceso.

ASISTENCIA MEJORADA

Entre sus funciones destacan las alertas de autodiagnóstico, la calibración automática al arrancar y antes de cada prueba, y recordatorios de mantenimiento.

GESTIÓN DE DATOS Y TENDENCIAS DE CRIBADO DE CLIENTES

Registra los datos de los clientes en el dispositivo y accede fácilmente a ellos. Analiza las tendencias de cribado mediante funciones estadísticas. Clini5 almacena hasta 150.000 archivos de clientes.

USO SEGURO Y CONTROLADO Y PROTECCIÓN DE DATOS Regula el acceso a los datos de los clientes mediante sistemas de protección.




MAYOR FLEXIBILIDAD EN LAS PRUEBAS

Cinco compartimentos para una mayor flexibilidad y rapidez en el uso. Se pueden realizar hasta cinco pruebas simultáneamente.



VÍDEO TUTORIAL

Para una formación sencilla, repaso y capacitación tanto para el personal actual como para los nuevos empleados.

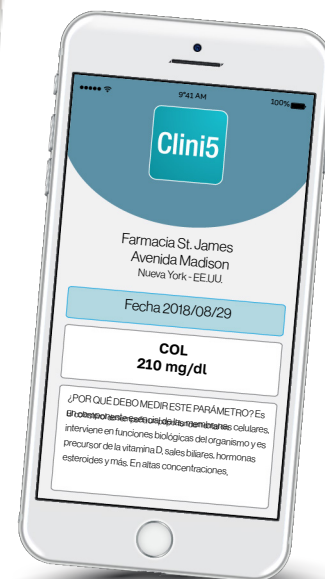

02 La Comunicación

COMUNICACIÓN DIGITAL DE RESULTADOS

Los resultados se reciben en el smartphone del cliente, facilitando el acceso y almacenamiento para futuras consultas. Se ofrece una visión general sobre la importancia de analizar cada parámetro, apoyando la educación del usuario y fomentando el autocuidado.

03 Los análisis

Colesterol total
Colesterol HDL
Colesterol LDL*
Glucosa
Triglicéridos
Hemoglobina
Glóbulos rojos
Hematocrito

Ácido úrico
Ácido láctico
FORT (Test para Radicales Libres de Oxígeno)
FORD (Defensa contra Radicales Libres de Oxígeno)
HbA1c
Índice Redox***
ALT
AST

AST/ALT***
Evaluación del riesgo cardíaco**
Bitest (Colesterol-Glucosa)

* El valor del colesterol LDL se calcula según la fórmula de Friedewald
** La evaluación del riesgo cardíaco se realiza conforme al modelo estadounidense Modelo estadístico "FRAMINGHAM HEART STUDY"
*** Valor calculado

04 Especificaciones técnicas

Principio de medición	Absorbancia (ley de Lambert-Beer)
Número de celdas de lectura	5
Dimensiones de las celdas de lectura	Aproximadamente 13x13 mm
Temperatura de las celdas de lectura	39±0,2°C
Fuente de luz	LED, Diodo Emisor de Luz
Longitud de onda (nm)	505 – 610 – 340
Trayectoria óptica	1 cm
Pantalla	7" TFT con pantalla táctil capacitiva
Conectividad	Ethernet
Vídeo	HDMI

Interfaz	3xUSB
Peso	2,7 kg aprox.
Dimensiones	240 (an) x 330 (prof) x 155 (alt) mm
Fuente de alimentación	12 V CC – 3,5 A
Consumo energético	máx. 45 vatios
Condiciones de funcionamiento	15-30°C (H.R. 90% máx., sin condensación)
Condiciones de almacenamiento	08-38°C (H.R. 95% máx.)
Condiciones de seguridad en funcionamiento	15-40°C
Certificaciones	Marcado CE0123

Dispositivo médico para diagnóstico in vitro diseñado para su uso por profesionales sanitarios y por usuarios no especializados en farmacias. El sistema es apto para autoevaluación y cumple con los requisitos de la Directiva 98/79/CE.